



MV-70


Função Coaching



Manual de uso

Ativar a função Coaching

O usuário pode ir à tela Coaching para fazer um tratamento que foi previamente salvo numa predefinição pela equipe médica.

NOT A:	A função Coaching apenas está disponível para predefinições que incluem tratamentos em modo INEX Auto ou modo IPPB.
---------------	---


A partir da tela clínica, clique em  para visualizar a tela "Função Coaching"

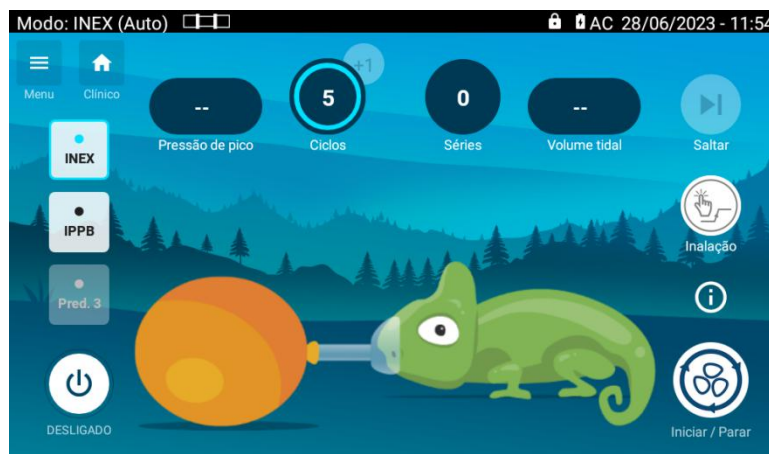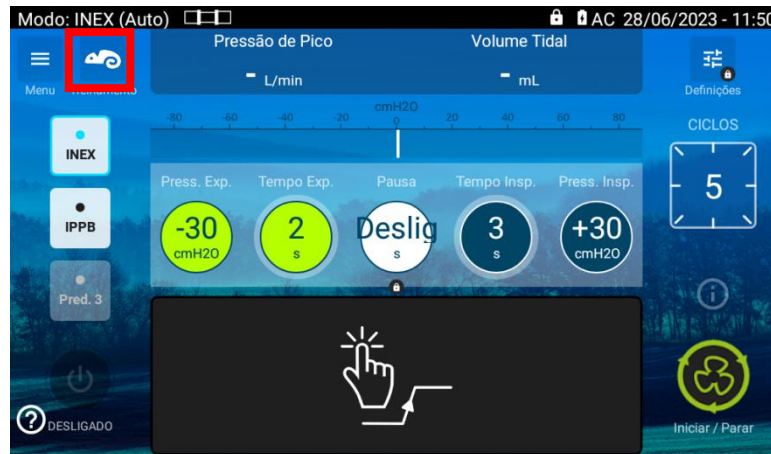

NOT A:	A função Coaching não pode ser utilizada em todos os modos de tratamento. Será apresentada uma mensagem se faltar algo para ativar a função.
---------------	--

	Se a mensagem na tela indicar que nenhuma das predefinições é compatível, entre em contato com seu médico.
--	--


Alterar predefinição na tela Coaching

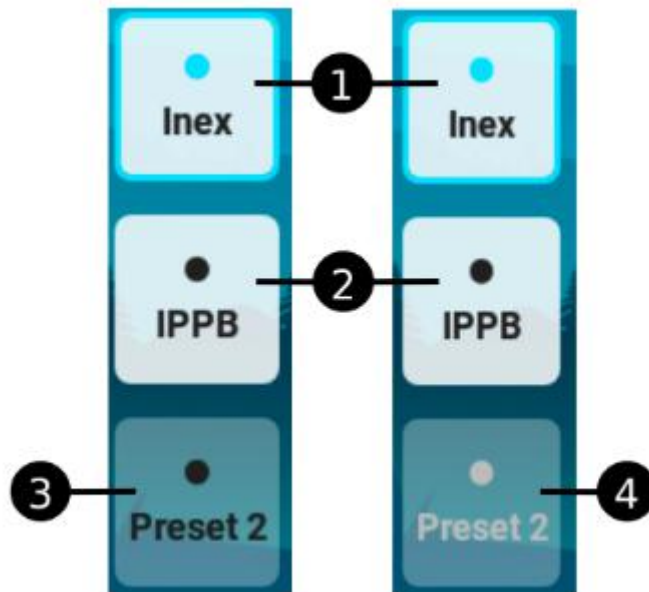

1. Predefinição ativada
2. Predefinição ativável
3. Predefinição inativa (indisponível para Coaching)
4. Predefinição vazia

Para mudar de predefinição, clique na predefinição desejada.
Se estiver em um tratamento em curso, não é possível alterar a predefinição.

A tela Coaching em INEX

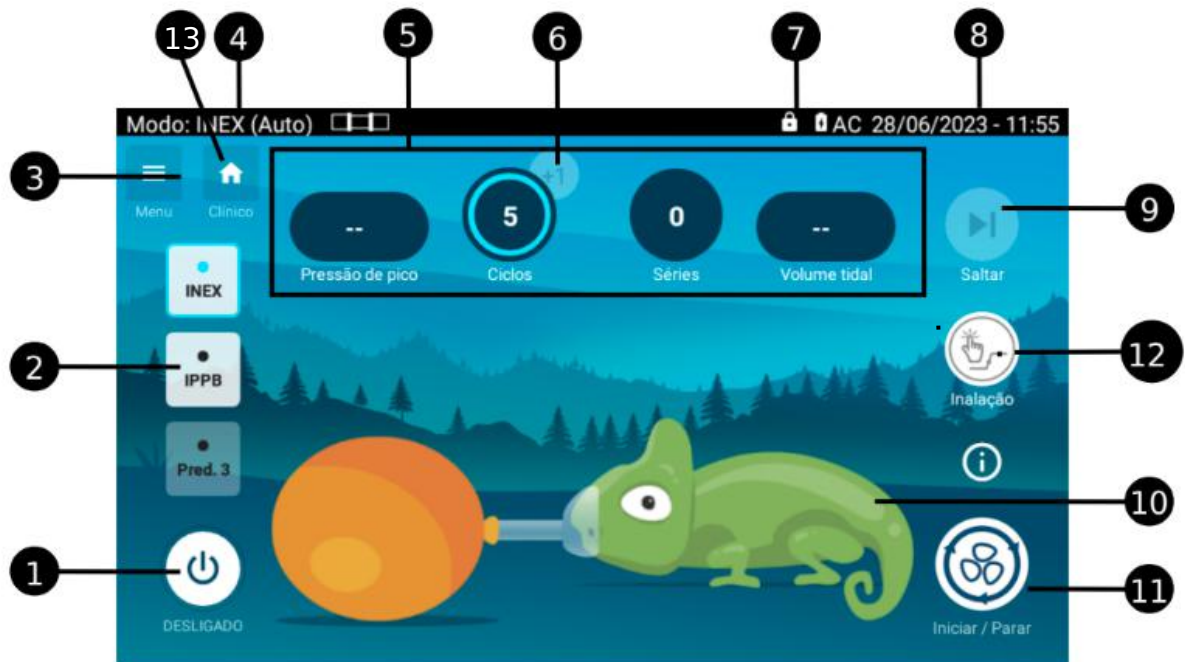


1. Botão para desligar
2. Predefinições (1-3): Predefinições disponíveis para o paciente.
3. Botão menu: Permite acessar aos diferentes menus
4. Indicador de modo de tratamento: INEX (manual/Auto) ou IPPB
5. Monitorizações de tratamento: apresenta os valores monitorizados em tempo real durante o tratamento.
6. Botão de adicionar ciclo: permite adicionar um ciclo ao tratamento em curso, se necessário.

7. Indicador de carga da bateria: indica o nível de carga restante da bateria ou se a bateria está carregando.
8. Data e hora: Indique a data em formato AAAA/MM/DD e a hora no formato 24 horas. Pode ser alterado no menu de preferências.
9. Botão "Avançar": permite interromper uma série INEX em curso antes do fim dos ciclos.
10. Camaleão: Animação que acompanha o tratamento configurado para auxiliar o paciente.
11. Botão iniciar/parar: inicia ou para o tratamento.
12. Botão Trigger: permite iniciar manualmente uma inspiração durante um tratamento.
13. Atalho para a tela clínica


Utilização da função Coaching para realizar um tratamento em modo INEX

Selecionar uma predefinição em INEX Auto e iniciar o tratamento. O camaleão e o balão vão acompanhar as diferentes fases do tratamento:

Durante a inspiração, o camaleão sopra e o balão esvazia.

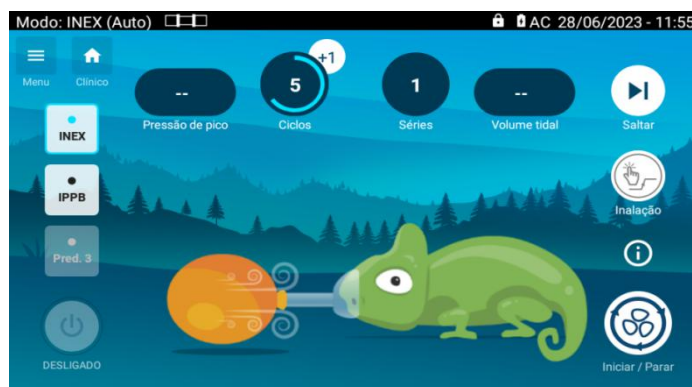

Durante a expiração, o camaleão expira e o balão enche.

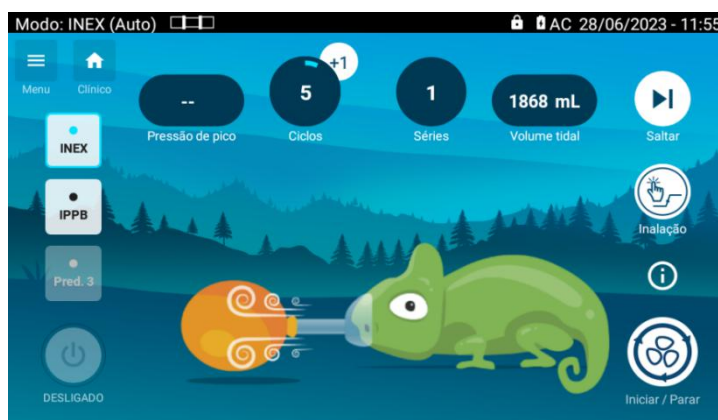

Durante a pausa, nem o camaleão nem o balão se mexem.

As monitorizações:


O pico de fluxo é atualizado após cada expiração.

O contador de ciclos diminui após cada expiração. Pode ser aumentado com o botão "+1" durante o último ciclo.

O contador de série aumenta após o início de cada ciclo. E volta para o zero quando a predefinição é alterada e quando o aparelho é desligado.


O volume é atualizado após cada inspiração.

No final do tratamento (ou quando o tratamento for interrompido com o botão "Avançar"), surge uma janela perguntando ao paciente se vai ser realizada uma nova série ou não.

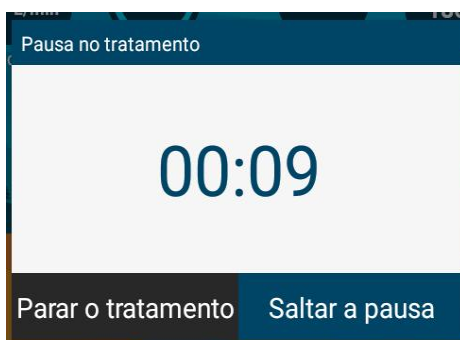

O temporizador é indicativo. Clique em "Avançar a pausa" para reiniciar uma série ou "Fim do tratamento" para parar o tratamento.

A tela Coaching em IPPB

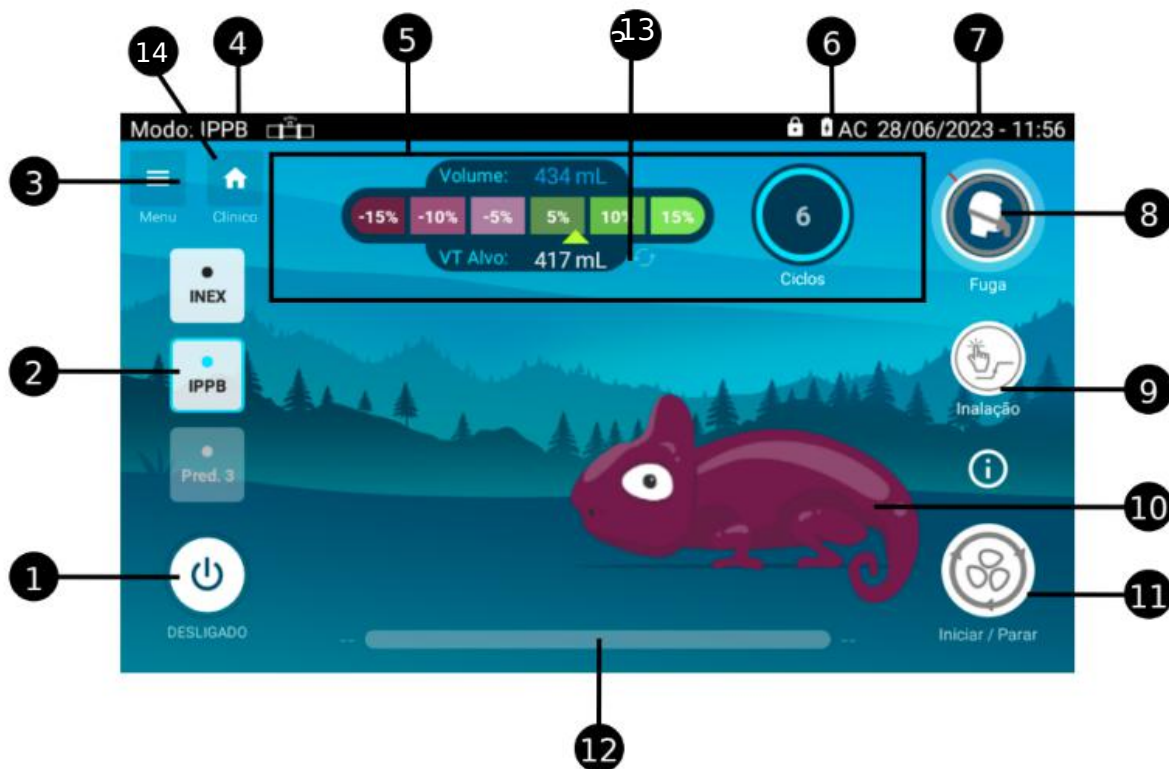


<ol style="list-style-type: none"> 1. Botão para desligar 2. Predefinições (1-3): Predefinições disponíveis para o paciente. 3. Botão menu: Permite acessar aos diferentes menus 4. Indicador de modo de tratamento: INEX (manual/Auto) ou IPPB 5. Monitorizações de tratamento: apresenta os valores monitorizados em tempo real durante o tratamento. 6. Indicador de carga da bateria: indica o nível de carga restante da bateria ou se a bateria está carregando. 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Data e hora: Indique a data em formato AAAA/MM/DD e a hora no formato 24 horas. Pode ser alterado no menu de preferências. 8. Indicador de fuga 9. Botão Trigger: permite iniciar manualmente uma inspiração durante um tratamento. 10. Camaleão: Animação que acompanha o tratamento configurado para auxiliar o paciente 11. Botão iniciar/parar: inicia ou para o tratamento. 12. Barra de tempo de tratamento: indica o tempo de tratamento passado e o tempo de tratamento restante 13. Reiniciar o volume alvo anteriormente definido 14. Atalho para a tela clínica
--	--

Utilização da função Coaching para realizar um tratamento IPPB

Selecionar uma predefinição em modo IPPB e iniciar o tratamento. Após a configuração, a inspiração tanto pode ser acionada pelo paciente como pelo botão dedicado.

A monitorização do Volume apresenta a evolução em tempo real do volume durante a inspiração. Esta monitorização permanece no valor do volume final até a próxima inspiração. O contador de ciclos é aumentado no início de cada inspiração.

No final de cada inspiração, as fugas da interface são avaliadas e o indicador de fuga  fica verde ou laranja. Um indicador laranja indica que há muita fuga na interface do paciente e que deve ser ajustada.

Durante a inspiração, o camaleão vai soprar em conformidade com a proporção do volume alvo previsto. Vai mudar progressivamente de cor para o verde, à medida que o volume é atingido e o volume alvo é ultrapassado.

Para as 3 primeiras inspirações:

- O camaleão não se mexe

- A monitorização do Volume Alvo permanece indefinida

Após 3 inspirações:

- O Volume Alvo é definido. É o volume médio das 3 primeiras inspirações. Permanece inalterado até ao final do tratamento.

Durante a expiração, o camaleão vai soprar progressivamente até voltar ao tamanho e à cor iniciais. Permanecerá assim até a próxima inspiração. A seta do gráfico de volume desloca-se no sentido da proporção do volume alvo previsto. Permanecerá no nível máximo atingido até a próxima inspiração.

